

PreciControl MultiAnalyte

03609979 190

para 4 x 2,0 ml

Português

Função

O dispositivo Elecsys PreciControl MultiAnalyte é utilizado para o controlo da qualidade dos imunoenaios Elecsys C-Peptide e Elecsys Insulin nos sistemas de imunoenaios Elecsys.

Características

O dispositivo Elecsys PreciControl MultiAnalyte contém soro de controlo liofilizado baseado numa matriz sérica equina em dois intervalos de concentração. Os controlos utilizam-se para monitorizar a exactidão e precisão dos imunoenaios Elecsys C-Peptide e Elecsys Insulin.

Reagentes - soluções de trabalho

Elecsys PreciControl MultiAnalyte, Ref. 03609979

- PC MA1: 2 frascos, cada um para 2,0 ml de soro de controlo
- PC MA2: 2 frascos, cada um para 2,0 ml de soro de controlo

Substância na matriz sérica equina	PC MA1	PC MA2
Péptido C (sintético)	aprox. 0,667 nmol/l (2 ng/ml)	aprox. 3,33 nmol/l (10 ng/ml)
Insulina (humana, recombinante, de levedura)	aprox. 139 pmol/l (20 µU/ml)	aprox. 695 pmol/l (100 µU/ml)

Os valores e os intervalos exactos estão codificados nos códigos de barras, estando também impressos na folha de valores incluída.

Valores e intervalos teóricos

Os valores e intervalos teóricos indicados nos códigos de barras e na folha de valores incluída foram determinados e avaliados pela Roche. Foram obtidos utilizando os reagentes do teste Elecsys e os analisadores Elecsys disponíveis na altura.

Se os valores teóricos e os intervalos de controlo fossem actualizados posteriormente, os dados correspondentes serão introduzidos através dos códigos de barras do reagente e da folha de valores adicional incluída no dispositivo. Nesta folha de valores são referidos todos os lotes de controlo que receberam novos valores. No caso que alguns dos valores permanecessem inalterados, os valores originais introduzidos através do código de barras do controlo (Control Barcode) e da folha de valores incluída no dispositivo de controlo continuam a ser válidos.

Os resultados têm de se situar dentro dos intervalos especificados correspondentes. Todos os passos do teste têm de ser verificados quando se observam tendências de aumento ou diminuição ou quando, subitamente, ocorrem desvios que ultrapassam os limites do intervalo.

As informações de rastreabilidade são fornecidas nos folhetos informativos do respectivo ensaio Elecsys.

Cada laboratório deve estabelecer as medidas correctivas a tomar no caso de os valores se situarem fora dos limites.

Precauções e advertências

Para utilização em diagnóstico in vitro.

Respeite as precauções normais de manuseamento de reagentes laboratoriais. Elimine todos os resíduos de acordo com os regulamentos locais.

Ficha de segurança fornecida a pedido, para uso profissional.

Evite a formação de espuma com todos os reagentes e com todo o tipo de amostras (amostras de pacientes, calibradores e controlos).

Preparação

Dissolva cuidadosamente o conteúdo de um frasco adicionando exactamente 2,0 ml de água destilada e deixe repousar fechado durante 15 minutos para reconstituir. Homogeneize cuidadosamente, evitando a formação de espuma.

Transfira o controlo reconstituído para frascos Elecsys vazios, identificados com rótulos e munidos de tampa "snap-cap" ou congele alíquotas nos frascos adicionais com tampa "snap-cap" (frascos ControlSet).

Coloque os rótulos fornecidos nestes frascos.

Realize **apenas um** procedimento de controlo de qualidade por alíquota.

Conservação e estabilidade

Conservar a 2-8°C.

O soro de controlo liofilizado permanece estável até ao fim do prazo de validade indicado.

Estabilidade dos componentes no soro de controlo reconstituído:

nos analisadores a 20-25°C:	até 3 horas
a -20°C:	1 mês (congelar apenas uma vez)
depois de descongelar:	Utilize uma única vez!

Materiais fornecidos

- Elecsys PreciControl MultiAnalyte, 2 cartões com código de barras, folha com código de barras, 2 x 2 frascos vazios rotulados e munidos com tampa "snap-cap", 2 x 6 rótulos para frascos

Materiais necessários (mas não fornecidos)

- Ref. 03142949, frascos ControlSet, 2 x 56 frascos vazios com tampa "snap-cap"
- Os sistemas de imunoenasão Elecsys 1010/2010 ou MODULAR ANALYTICS E170 e reagentes do ensaio. Consulte o folheto informativo do teste e o manual do operador apropriados para saber quais são os outros materiais necessários.
- Água destilada ou desionizada

Realização do ensaio

Para o doseamento nos analisadores, trate o soro de controlo reconstituído que se encontra nos frascos rotulados, compatíveis com o sistema, da mesma forma que as amostras dos pacientes. Introduza no analisador os dados codificados no código de barras dos rótulos dos frascos e nos códigos de barras dos cartões.

Verifique se os controlos estão à temperatura ambiente (20-25°C) antes de efectuar a determinação.

Os controlos devem ser efectuados diariamente em paralelo com as amostras dos pacientes, uma vez por dispositivo de reagentes e sempre que for realizada uma calibração. Os intervalos e limites de controlo devem ser adaptados às exigências específicas de cada laboratório.

NOTA PARA O COMPRADOR: LIMITED LICENSE

A aquisição deste produto permite que o comprador o utilize exclusivamente para diagnóstico in vitro humano pela tecnologia ECL. Nenhuma patente geral ou outra licença de qualquer tipo, à excepção deste direito específico de uso de compra, é concedida por este meio. Este produto não pode ser usado pelo comprador na pesquisa/desenvolvimento em ciências da vida, em testes de auto-diagnóstico, na identificação/desenvolvimento de drogas ou em qualquer utilização ou teste veterinário, alimentar, de água ou ambiental.

Para mais informações, consulte o manual do operador adequado ao analisador, as folhas de aplicação respectivas, a informação do produto e os folhetos informativos de todos os componentes necessários.

As alterações ou os acréscimos significativos estão assinalados por uma barra de alteração na margem.
©2005 Roche Diagnostics



Roche Diagnostics GmbH, D-68298 Mannheim

